



OPTICELL Soft Plus



Behandlende opp til og med sårkategori 3

Enkel å tilpasse brukerens vekt

Rask og sikker tømning ved HLR-situasjoner

Nye OptiTex™ -trekket med gode egenskaper

” *En statisk trykkavlastende luftovermadrass med hygienetrekk, manuell pumpe og utbyttbare celler.*

OPTICELL SOFT PLUS

OptiCell Soft Plus er en statisk trykkavlastende luftmadrass utviklet som et forebyggende og behandlende hjelpemiddel ved behandling av trykksår opp til og med kategori 3.

OptiCell Soft Plus er av typen overmadrass og plasseres ovenpå en skummadrass (f eks en av Järvens standardmadrasser).

OptiCell Soft Plus leveres med et slitesterkt OptiTex™ hygienetrekk og HLR/CPR-ventil for akutte situasjoner. Den 13 cm tykke madrassen har celler og trekk som sammen gir en Low Air Loss-funksjon - samtidig som trekket er helt vannavvisende.

Den medfølgende pumpen, som gir et statistisk lavt trykk, er enkel å forstå og bruke og skal stilles manuelt inn etter brukerens vekt.

EGENSKAPER – Pumpe og celler

Individuell tilpasning etter pasientens vekt, 30-250 kg.

HLR/CPR-ventil – Ved akutsituasjoner der HLR behøves påbegynnes åpnes CPR-ventilen for å gi rask lufttømming.

Alarmfunksjon – Luftpumpen har en alarmfunksjon som med både lys- og lydalarm som varsler for lavt trykk i madrassen eller strømbrudd.

Hælavlastning – Madrassen er utstyrt med et avlastningssystem som muliggjør enkel utkobling av cellene ved hjelp av en integrert luftlås.

EGENSKAPER – OptiTex™ hygienetrekk

Integrert kabelholder – OptiTex™-trekket har integrert, vannavvisende kabelholder som hindrer bakteriespredning, holder el-kabelen på plass og beskytter luftslangene.

God hygiene – OptiTex™-trekket kan rengjøres med et desinfeksjonsmiddel eller vaskes i maskin inntil 95° C.

Celler og slanger tas enkelt ut av trekket og skylles rene med varmt vann (maks 70° C) eller ved bruk av et desinfeksjonsmiddel.

Low Air Loss funksjon – OptiTex™-trekket tillater luft å trenge ut fra cellene samtidig som det er vanntett. Dette minsker risken for skyvekter og andre komplikasjoner som kan oppstå for brukeren.

Dråpebeskyttet vanntett glidlås på fire sider. Alle sømmer er sveisede.

Underside med antigli-funksjon med fire festebånd.

Trekket er utstyrt med fire stykk håndtak for forflytning.

Produktspesifikasjoner

STANDARDSTØRRELSER

190/200/210/220x80/85/90/105/120x13 cm.

For andre størrelser vennligst ta kontakt.

TRYKKSÅRSKATEGORI 1-3

CELLER 17 (200 cm) utskiftbare celler laget av myk nylon/TPU (polyuretan) med Low Air Loss funksjon.

TREKKET OptiTex™ bi-elastisk "double-coated" tekstil med myk elastisk PU.

PUMPEN OC-15 er en avansert pumpe med sensorer som manuelt tilpasses brukerens vekt. Lydnivå: 21 db. 230 V. En Ready-lampe viser når pumpen og madrassen er klar til bruk. Om lampen ikke lyser er det en indikasjon på at noe er feil og produktet trenger service.

GARANTI 2 år på fabrikkasjonsfeil.

BRANNSTANDARD EN 597-1 & -2.

BRUKERVEKT i intervallet 30-250 kg.

GJENNVINNING Se bruksanvisning.

VEKT Madrass 6 kg (200 x 90 cm), pumpe 2,0 kg

MERKING produksjonsdato, rengjøringsinstruksjoner, standarder - samt plassering i seng.



LEVERES MED OptiTex™- ET HYGIENETREKK MED GODE EGENSKAPER



TREKKETS
FUKT MOTSTAND
ISO 811-1981



SLIPPER UT
LUFT
ISO 11092



TREKKETS
BRANNSTANDARD
BS EN 597-1 & 2



TREKKETS
ELASTISITET
EN ISO 13934-1 1999



HYDROSTATISK
EGENSKAP
ISO 811-1981