

OPTICELL Soft



Til og med
sårkategori 2

Enkel å tilpasse
brukerens vekt

Rask og sikker
tømming ved
HLR-
situasjoner

Hygienetrek
med gode
egenskaper

” *En statisk trykkavlastende luftovermadrass med hygienetrek, manuell pumpe og utbyttbare celler for barn/junior.*

OPTICELL SOFT

OptiCell Soft junior, er en statisk trykkavlastende luftmadrass utviklet som et forebyggende hjelpemiddel ved behandling av trykksår opp til og med kategori 2.

OptiCell Soft er av typen overmadrass og plasseres ovenpå en skummadrass (f.eks. en av Järvens standardmadrasser).

OptiCell Soft leveres med et slitesterkt hygienetrekk og HLR/CPR-ventil for akutte situasjoner. Den 10 cm tykke overmadrassen har sammensveisede celler og et trekk som er helt vannavvisende.

Den medfølgende pumpen, som gir et statisk lavt trykk, er enkel å forstå og bruke og skal stilles manuelt inn etter brukerens vekt.

EGENSKAPER – Pumpe og celler

Individuell tilpasning etter pasientens vekt, 30-250 kg.

HLR/CPR-ventil – Ved akutsituasjoner der HLR behøves påbegynnes åpnes CPR-ventilen for å gi rask lufttømming.

Alarmpunksjon – Luftpumpen har en alarmpunksjon som med både lys- og lydalarm som varsler for lavt trykk i madrassen eller strømbrytning.

EGENSKAPER – hygienetrekket

Integrert kabelholder – trekket har integrert, vannavvisende kabelholder som hindrer bakteriespredning, holder el-kabelen på plass og beskytter luftslangene.

God hygiene – trekket kan rengjøres med et desinfeksjonsmiddel eller vaskes i maskin inntil 95° C.

Celler og slanger tas enkelt ut av trekket og skylles rene med varmt vann (maks 70° C) eller ved bruk av et desinfeksjonsmiddel.

Dråpebeskyttet vanntett glidlås på fire sider. Alle sømmer er sveisede.

Underside med med fire festebånd.

Produktspesifikasjoner

STANDARDSTØRRELSE

70x160x10 cm. For andre størrelser vennligst ta kontakt.

TRYKKSÅRSKATEGORI 1-3

CELLER 17 (200 cm) utskiftbare celler laget av myk nylon/TPU (polyuretan) med Low Air Loss funksjon.

TREKKET OptiTex™ bi-elastisk "double-coated" tekstil med myk elastisk PU.

PUMPEN OC-15 er en avansert pumpe med sensorer som manuelt tilpasses brukerens vekt. Lydnivå: 21 db. 230 V. En Ready-lampe viser når pumpen og madrassen er klar til bruk. Om lampen ikke lyser er det en indikasjon på at noe er feil og produktet trenger service.

GARANTI 2 år på fabrikkasjonsfeil.

BRANNSTANDARD EN 597-1 & -2.

BRUKERVEKT i intervallet 30-250 kg.

GJENNVINNING Se bruksanvisning.

VEKT Madrass 6 kg (200 x 90 cm), pumpe 2,0 kg

MERKING produksjonsdato, rengjøringsinstruksjoner, standarder - samt plassering i seng.



LEVERES MED OptiTex™- ET HYGIENETREKK MED GODE EGENSKAPER



TREKKETS
FUKTMODSTAND
ISO 811-1981



SLIPPER UT
LUFT
ISO 11092



TREKKETS
BRANNSTANDARD
BS EN 597-1 & 2



TREKKETS
ELASTISITET
EN ISO 13934-1 1999



HYDROSTATISK
EGENSKAP
ISO 811-1981